



Brochure

Novalis CryoLab

la nueva generación de remodelación corporal no invasiva

Novalis CryoLab utiliza tecnología avanzada de **criolipólisis 360°**, capaz de enfriar de manera controlada y uniforme el tejido adiposo para provocar la apoptosis de los adipocitos (muerte celular programada) y su posterior eliminación natural a través del sistema linfático. El resultado: **reducción localizada del tejido graso**, sin cirugía, sin inyecciones y con mínima o nula incomodidad.



Sobre la Criolipólisis


La criolipólisis actúa enfriando el tejido adiposo hasta alcanzar temperaturas que solidifican los triglicéridos dentro del adipocito. Esto genera apoptosis y eliminación progresiva de la grasa, manteniendo la piel, músculos y tejidos circundantes completamente seguros

- A los 3 días se inicia la apoptosis.
- A los 14 días, las células grasas muertas empiezan a drenarse naturalmente.
- A los 90 días, la reducción del grosor de la **zona** es visible y consolidada.

03

Ventajas de CryoLab

- **360° Cooling:** enfriamiento envolvente, más homogéneo que los sistemas tradicionales.
- **Cinco manerales activos:** posibilidad de tratar múltiples zonas en simultáneo.
- **Amplia variedad de copas intercambiables** para personalizar cada tratamiento según la anatomía del paciente.
- **Tecnología segura** con sensores de presión, temperatura real y flujo de agua.
- **Resultados visibles y naturales** desde las primeras semanas.

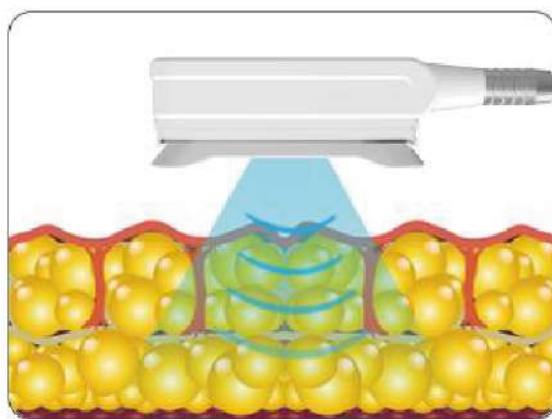

Zonas tratables

- Abdomen
- Cintura / flancos
- Espalda
- Brazos
- Muslos (interno, externo y posterior)
- Glúteos
- Papada (con mini cabezal 40x76 mm)

04

¿Cómo funciona el tratamiento?

El equipo combina **vacío controlado + enfriamiento progresivo**:

1. Se mide el grosor del tejido adiposo.
2. Se marca y limpia la zona.
3. Se aplica una **membrana anticongelante** obligatoria para proteger la piel.
4. El maneral succiona suavemente el tejido para aislar el pliegue graso.
5. Comienza el enfriamiento hasta alcanzar temperaturas terapéuticas entre 0°C y -13°C según el protocolo.
6. En los últimos minutos se activa la fase de **masaje con vacío pulsado**, favoreciendo la movilización del tejido.

El sistema permite tratamientos de **30 a 60 minutos por zona**.



Manerales y copas

CryoLab incluye 5 manerales y 9 copas intercambiables, permitiendo adaptar cada sesión a la complexión del paciente.

Manerales disponibles

- 1 maneral grande — abdomen, espalda, glúteos.
- 2 manerales medianos — cintura, muslos.
- 1 maneral pequeño — brazos, muslo interno, pantorrilla.
- 1 mini crio (40x76 mm) — papada, brazos.

Cada copa permite ajustar la profundidad de succión y la ergonomía de la zona.



Experiencia del paciente

El tratamiento es bien tolerado. Las sensaciones típicas:

- Succión inicial del tejido.
- Frío progresivo.
- Ligera molestia o entumecimiento temporal.
- Eritema leve que desaparece rápidamente.

El paciente puede retomar sus actividades inmediatamente.

Seguridad y contraindicaciones

CryoLab está equipado con sistemas de protección:

- Placas de enfriamiento con sensor de temperatura real.
- Sensor de presión del vacío.
- Sensor de flujo de agua.
- Sistema de enfriamiento por **agua + aire + semiconductor**.

Resultados esperados

- Reducción visible desde las primeras semanas.
- Eliminación continua de grasa durante hasta 90 días.

Contraindicaciones

- Enfermedades hepáticas.
- Enfermedad de Raynaud, urticaria por frío, crioglobulinemia.
- Diabetes no controlada.
- Problemas circulatorios importantes, trombosis venosa profunda.
- Enfermedades cutáneas activas.
- Embarazo o postparto <5 meses.

Elevando la **excelencia** medico-estética



Novalis Medical S.A. de C.V.

Egipto, Mz9, L3, Encinos, 14239, CDMX

(+52) 55 6518 7649

mexico@novalismedical.com

novalismed.com/es



©2026 **Novalis Medical**. Todos los derechos reservados.

Novalis, el logotipo de Novalis Medical, NeuroNova, Aurora, CryoLab, Lumina, Lumina+, Gemini y Hi-Fu son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Novalis Medical en México y otros países.