



Brochure

Novalis Gemini

02 dos tecnologías líderes en un solo equipo

Novalis Gemini reúne en una única plataforma las dos tecnologías más demandadas en cabina: el **láser de diodo** de triple longitud de onda para **depilación progresiva** y la **tecnología NIR** (infrarrojo cercano) para **rejuvenecimiento térmico y reafirmación cutánea**. Cada tecnología opera con su propio manipulador especializado, permitiendo al profesional ofrecer un catálogo completo de tratamientos desde un solo equipo, optimizando espacio, inversión y productividad.



Sobre las tecnologías



El **manipulador láser** emite en tres longitudes de onda simultáneas (755/808/1064 nm), cada una optimizada para una profundidad y tipo de folículo distinto. El sistema de enfriamiento ICE integrado en la pieza de mano protege la epidermis y reduce la molestia, permitiendo trabajar a potencias altas con menos sesiones. **Apto para todos los fototipos.**

El **manipulador NIR** genera un calentamiento profundo y controlado del tejido al ser absorbido por el agua tisular. En profundidad se alcanzan temperaturas terapéuticas (~65-70 °C) mientras la superficie se mantiene confortable (~40-42 °C) gracias a la refrigeración integrada. Esto produce **contracción inmediata de las fibras de colágeno, activación de fibroblastos y mejora de la microcirculación.**

03

Ventajas de Gemini

- **Plataforma 2 en 1:** depilación láser + rejuvenecimiento térmico NIR en un solo equipo. Dos fuentes de ingreso con una sola inversión.
- **Triple longitud de onda láser:** cobertura completa de todos los fototipos y tipos de vello.
- **Enfriamiento ICE** por contacto en el manipulador láser y **refrigeración integrada** en el manipulador NIR facial.
- **Tres modos de depilación:** rápido (HR), normal con pulso ajustable y STACK/estático para zonas rebeldes.
- **Modo In-Motion NIR:** pasadas continuas con acumulación gradual de calor para rejuvenecimiento confortable.
- **Sin downtime** en ambos tratamientos

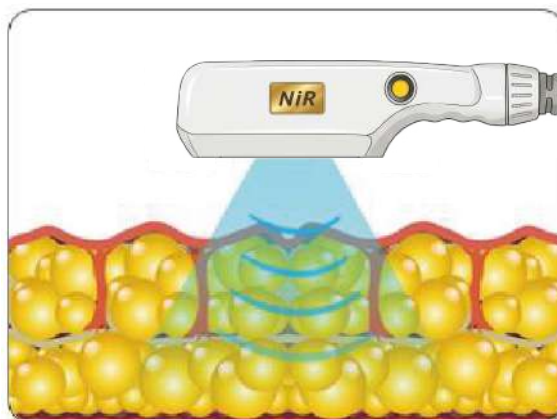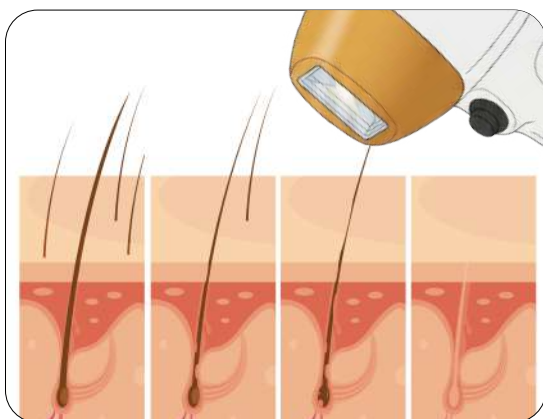

Zonas tratables

Depilación láser:

Rostro (bigote, mentón, patillas), axilas, brazos, pecho, espalda, abdomen, ingles, piernas completas y cualquier zona corporal con vello no deseado.

Rejuvenecimiento NIR:

Rostro completo (óvalo, pómulos, zona periocular), cuello, escote, brazos, abdomen, flancos, muslos, rodillas y glúteos.

04

¿Cómo funciona el tratamiento?

Depilación láser:

- Se evalúa el fototipo (I–VI), densidad, grosor y color del vello.
- Se rasura y limpia la zona en profundidad.
- Se aplica gel conductor y se selecciona el modo de trabajo (rápido, normal o STACK) ajustando Hz, fluencia, pulso y nivel de enfriamiento.
- Se trabaja por cuadrantes (~5x10 cm), manteniendo el manipulador siempre en contacto con la piel, con 6–9 pasadas por cuadrante.
- Al finalizar se retira el gel y se aplica frío local durante 10–15 minutos.

Rejuvenecimiento NIR:

- Se limpia la zona y se elimina cualquier cosmético.
- Se aplica gel neutro de acoplamiento.
- Se selecciona la intensidad según zona y tolerancia (rostro ~350–500; cuerpo ~270–400).
- Se realizan pasadas continuas en modo In-Motion manteniendo la ventana térmica, adaptando la maniobra al objetivo: arrastre ascendente para laxitud, compresión suave para adiposidad/retención.
- Revisión visual y táctil del área e indicaciones postratamiento.

Experiencia del paciente

Ambos tratamientos son **bien tolerados**. En depilación, el paciente percibe leves toques eléctricos y calor moderado gracias al enfriamiento ICE. En rejuvenecimiento NIR, la sensación es de calor profundo y progresivo con la superficie templada. En ambos casos puede aparecer eritema transitorio que desaparece rápidamente. **Sin tiempo de inactividad.**

Resultados esperados

Depilación: reducción visible desde las primeras 2–3 sesiones. Para vello grueso ~5 sesiones, vello fino ~3 sesiones. Sesiones espaciadas cada 4–6 semanas.

Rejuvenecimiento: efecto tensor inmediato desde la primera sesión. Mejora progresiva de tonicidad, textura y luminosidad desde la tercera sesión por neocolagénesis.

Tratamientos disponibles

Indicaciones para el rostro

- Eliminación de manchas melanínicas (lentigo solar/senil, melasma, cloasma)
- Eliminación de queratosis seborreica y actínica
- Eliminación de angiomas rubí y fibromas pendulares
- Microlifting no quirúrgico facial y cervical
- Blefaroplastia no quirúrgica
- Tratamiento de la zona orbicular
- Microdermoabrasión y reducción de cicatrices postacnéicas
- Eliminación de siringomas y xantelasmas palpebrales
- Transporte transdérmico de ácido hialurónico y principios activo



Indicaciones para el cuerpo

- Tratamiento de celulitis y adiposidad localizada
- Remodelación y tonificación tisular
- Reducción de estrías y queloides
- Reafirmación de brazos, muslos, glúteos, axilas y papada
- Transporte transdérmico corporal

Seguridad y contraindicaciones

Novalis Gemini integra los sistemas de seguridad de ambas tecnologías:

- Enfriamiento ICE por contacto en el manipulador láser y refrigeración en el manipulador NIR.
- Llave de seguridad y autodiagnóstico al encendido.
- Gafas de protección profesional incluidas para paciente y operador (tratamientos láser).
- Ventana térmica controlada en modo NIR con modo In-Motion para evitar sobrecalentamiento localizado.

Experiencia del paciente

El tratamiento es indoloro o con molestia mínima. Las sensaciones típicas: ligero calor superficial, leve hormigueo por las microcorrientes y sensación de frescor tras la producción de ozono. El paciente puede retomar sus actividades inmediatamente.

Contraindicaciones

- Embarazo.
- Hipertensión, diabetes o cardiopatías no controladas.
- Portadores de marcapasos.
- Enfermedades cutáneas graves, infecciones activas o lesiones sospechosas en la zona.
- Personas sensibles a la electricidad.
- Infiltración de toxina botulínica reciente (esperar 3 meses antes de láser).
- Cirugía cutánea reciente: proteger las zonas tratadas.
- Trastornos de cicatrización o coagulopatías.
- Neoplasias activas en la zona de tratamiento.
- Uso de fármacos fotosensibilizantes o retinoides: posponer.

Elevando la **excelencia** medico-estética



Novalis Medical S.A. de C.V.

Egipto, Mz9, L3, Encinos, 14239, CDMX

(+52) 55 6518 7649

mexico@novalismedical.com

novalismed.com/es



©2026 **Novalis Medical**. Todos los derechos reservados.

Novalis, el logotipo de Novalis Medical, NeuroNova, Aurora, CryoLab, Lumina, Lumina+, Gemini y Hi-Fu son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Novalis Medical en México y otros países.