



Brochure

Novalis Hi-Fu

02 la nueva generación de lifting y remodelación no invasiva

Novalis Hi-Fu combina **tres tecnologías** sinérgicas en una única plataforma: **ultrasonido focalizado** de alta intensidad (HIFU), **radiofrecuencia** (RF) a 6.78 MHz y **microcorrientes dirigidas** (EMS). El ultrasonido focalizado concentra energía en puntos precisos del tejido a profundidades controladas (desde la epidermis hasta la capa fascial) generando puntos de coagulación térmica que **contraen el colágeno existente y activan la producción de colágeno y elastina nuevos**. La RF complementa calentando la dermis a ~45 °C para **reafirmar y mejorar la textura**, mientras el EMS estimula la contracción muscular isométrica para **tonificar y combatir el envejecimiento inflamatorio a nivel celular**.



Sobre Hi-Fu


Actúa depositando **energía térmica en puntos específicos** bajo la piel, sin dañar la superficie. Según la profundidad de la sonda, el tratamiento alcanza distintas capas:

- **Epidermis:** mejora de textura y luminosidad.
- **Dermis:** estimulación de colágeno y reducción de arrugas.
- **Capa fascial:** lifting profundo y retensado del óvalo facial.
- **Zona periocular:** tratamiento específico del contorno de ojos.
- **Cuerpo:** remodelación, reducción de grasa localizada y reafirmación.

03

Ventajas de Novalis Hi-Fu

- **Triple tecnología integrada:** HIFU + RF + EMS en una sola plataforma, con acción sinérgica personalizable por el operador.
- **Tres manípulos especializados** con sondas intercambiables para rostro, ojos y cuerpo.
- **Profundidad precisa y regulable:** desde 1.5 mm (epidermis) hasta 18 mm (tejido adiposo profundo) con sondas intercambiables
- **Dos modos de operación:** Normal (punto por punto) y MP (refuerzo focalizado en zonas clave).
- **Resultados visibles desde la primera sesión** con mejora progresiva durante las semanas siguientes.

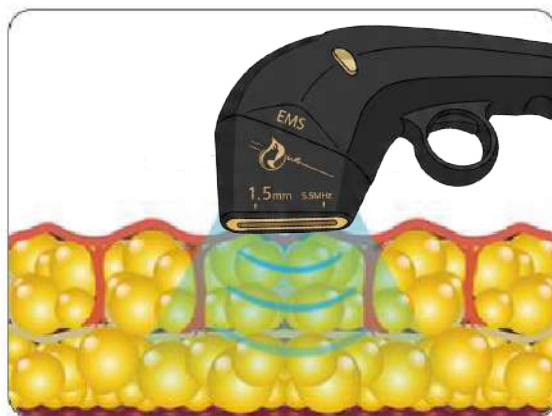

Zonas tratables

- Rostro completo (frente, pómulos, mandíbula, surcos nasogenianos)
- Contorno de ojos (patas de gallo, párpados, bolsas)
- Cuello y papada
- Brazos (alas de murciélago)
- Abdomen
- Muslos y pantorrillas
- Glúteos

04

¿Cómo funciona el tratamiento?

El profesional selecciona la sonda y la profundidad adecuadas según la zona y el objetivo del tratamiento:

1. Se limpia la zona y se aplica gel conductor neutro sobre el área y la ventana de la sonda.
2. Se selecciona el manípulo (15RS para rostro/ojos, 36RS para rostro con mayor cobertura, 18RS para cuerpo) y la sonda se conecta al equipo, que la reconoce automáticamente.
3. Se ajustan los parámetros de energía, densidad, longitud y modo (Normal o MP) según la zona, el tipo de piel y la tolerancia del paciente. La energía siempre se ajusta de baja a adecuada.
4. Se aplica la sonda sobre la piel con técnica de estampado (stamp) o deslizamiento (slide) según la zona. No se repite más de 3 veces sobre el mismo punto.
5. Al finalizar, se limpia el área, se retira el gel y se aplica una mascarilla hidratante reparadora.

Manípulos disponibles


Novalis Hi-Fu incluye tres manípulos con sondas intercambiables, **adaptables a cada zona y profundidad** de tratamiento.

36RS: Rostro y ojos, operación con pedal

15RS: Rostro, mayor cobertura

18RS: Cuerpo

Cada sonda es **consumible y reemplazable**, con contador de disparos integrado en pantalla.

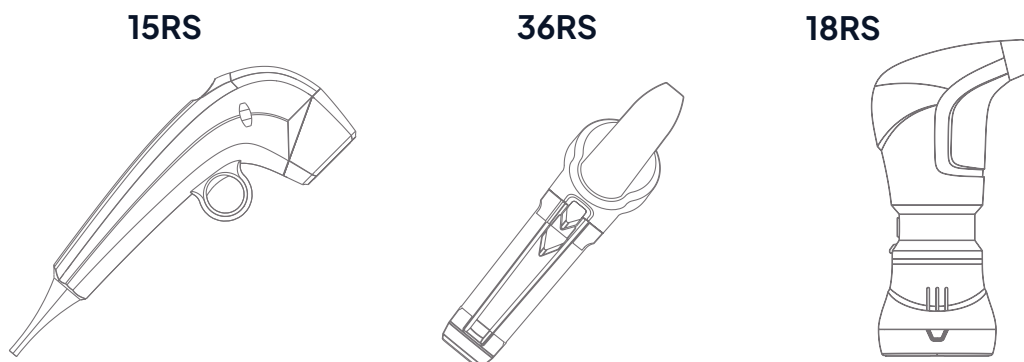

Tratamientos disponibles

Indicaciones para el rostro

- Eliminación de manchas melanínicas (lentigo solar/senil, melasma, cloasma)
- Eliminación de queratosis seborreica y actínica
- Eliminación de angiomas rubí y fibromas pendulares
- Microlifting no quirúrgico facial y cervical
- Blefaroplastia no quirúrgica
- Tratamiento de la zona orbicular
- Microdermoabrasión y reducción de cicatrices postacnéicas
- Eliminación de siringomas y xantelasmas palpebrales
- Transporte transdérmico de ácido hialurónico y principios activo



Indicaciones para el cuerpo

- Tratamiento de celulitis y adiposidad localizada
- Remodelación y tonificación tisular
- Reducción de estrías y queloides
- Reafirmación de brazos, muslos, glúteos, axilas y papada
- Transporte transdérmico corporal

Seguridad y contraindicaciones

Novalis Hi-Fu está diseñado con múltiples sistemas de seguridad:

- Reconocimiento automático de sonda con verificación de compatibilidad (alarma si la sonda no corresponde).
- Contador de disparos integrado para control del consumible.
- Ajuste de energía progresivo de baja a adecuada.
- Sistema de alarma de temperatura del ventilador.
- Interruptor de emergencia para detención inmediata.

Experiencia del paciente

El tratamiento es indoloro o con molestia mínima. Las sensaciones típicas: ligero calor superficial, leve hormigueo por las microcorrientes y sensación de frescor tras la producción de ozono. El paciente puede retomar sus actividades inmediatamente.

Contraindicaciones

- Heridas abiertas o no cicatrizadas en la zona de tratamiento.
- Implantes metálicos o stents en la zona de tratamiento.
- Acné severo o acné folicular activo en la zona.
- Embarazo y lactancia.
- Portadores de dispositivos electrónicos implantados (marcapasos).
- Enfermedades cardiovasculares u otras patologías sistémicas.
- Enfermedades cutáneas activas o lesiones en la zona.
- Trastornos de coagulación sanguínea.
- Fotosensibilidad o uso de fármacos fotosensibilizantes.
- Constitución queloide o cicatrización hipertrófica.
- Diabetes o epilepsia.
- Infección por herpes virus.
- Personas mayores de 65 años (requiere evaluación previa).

Elevando la **excelencia** medico-estética



Novalis Medical S.A. de C.V.

Egipto, Mz9, L3, Encinos, 14239, CDMX

(+52) 55 6518 7649

mexico@novalismedical.com

novalismed.com/es



©2026 **Novalis Medical**. Todos los derechos reservados.

Novalis, el logotipo de Novalis Medical, NeuroNova, Aurora, CryoLab, Lumina, Lumina+, Gemini y Hi-Fu son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Novalis Medical en México y otros países.