



Brochure

**Novalis Lumina**

## 02 la nueva generación de depilación láser profesional

**Novalis Lumina** es una plataforma de **láser de diodo** de alta potencia con triple longitud de onda (755 nm / 808 nm / 1064 nm) que combina energía óptica y **enfriamiento por contacto** integrado en el manípulo. El sistema emplea absorción selectiva de la luz para calentar el folículo piloso y desactivarlo progresivamente, mientras mantiene la epidermis protegida y fresca. El resultado: depilación eficaz, con mínima molestia y máxima seguridad para todos los fototipos.



### Sobre la tecnología


El láser de diodo utiliza una barra de diodos de GaAlAs que emite en tres longitudes de onda simultáneas, cada una optimizada para una profundidad y tipo de estructura folicular distinta. La tecnología de potencia de impulsos combinada con la refrigeración ICE permite **eliminar el vello sin dolor**, actuando con mayor eficacia durante la fase de crecimiento activo del folículo.

- Resultados visibles desde las primeras 2-3 sesiones.
- Los pelos residuales caen de forma natural en los 7 días posteriores al tratamiento.
- Eliminación progresiva con plan de sesiones espaciadas cada 4-6 semanas.

## 03

### Ventajas de Lumina

- **Cobertura completa:** de todos los fototipos (I a VI) y tipos de vello.
- **Enfriamiento por contacto:** protege la epidermis, reduce la molestia y permite trabajar a potencias más altas con menos sesiones.
- **Tres modos de trabajo:** rápido (HR) para reducción de volumen, normal con pulso ajustable (ms) para sesiones intermedias, y STACK/estático para zonas rebeldes o vello fino.
- **Diseño modular y ergonómico,** fácil de mantener y reparar.
- **Resultados visibles y naturales** desde las primeras semanas.

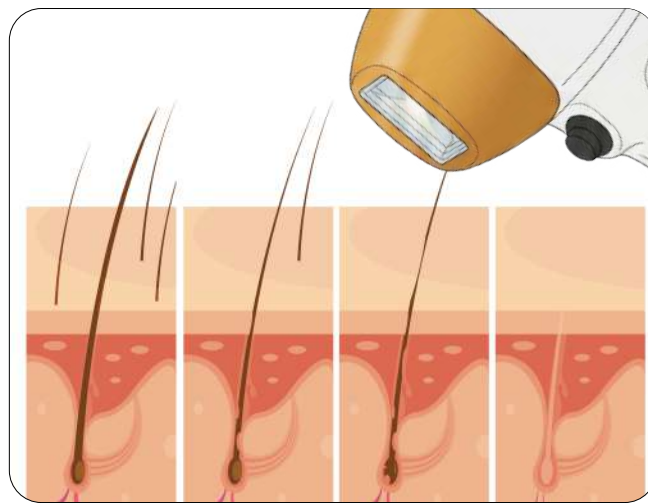

### Zonas tratables

- Rostro (bigote, mentón, patillas)
- Axilas
- Brazos y antebrazos
- Pecho y espalda
- Abdomen
- Ingles (bikini completo)
- Piernas completas (muslos, pantorrillas)
- Cualquier zona corporal con vello no deseado

## 04

## ¿Cómo funciona el tratamiento?

El tratamiento se desarrolla en **pasos secuenciales** optimizados:

1. Se evalúa el fototipo del paciente (I–VI) y se analiza la densidad, grosor y color del vello.
2. Se rasura y limpia la zona en profundidad.
3. Se aplica gel conductor sobre el área a tratar.
4. Se selecciona el modo de trabajo (rápido, normal o STACK) y se ajustan los parámetros (Hz, fluencia, tiempo de pulso y nivel de enfriamiento) según zona y fototipo.
5. Se trabaja por cuadrantes (~5×10 cm), manteniendo el manípulo siempre en contacto con la piel: primero enfriamiento, luego disparo, con 6–9 pasadas por cuadrante.
6. Al finalizar se retira el gel y se aplica frío local durante 10–15 minutos.

El sistema permite sesiones de depilación corporal completa en tiempos reducidos gracias a su modo rápido de alta frecuencia (hasta 10 Hz).



## Resultados esperados

- Reducción visible del vello desde las primeras 2–3 sesiones.
- Para vello grueso: aproximadamente 5 sesiones; para vello fino y suave: 3 sesiones.
- Eliminación progresiva con sesiones espaciadas cada 4–6 semanas, siguiendo el ciclo natural de crecimiento del folículo.

# Seguridad y contraindicaciones

---

**Novalis Lumina** está diseñado con los más altos estándares de seguridad:

- Enfriamiento ICE por contacto integrado en la pieza de mano para protección epidérmica.
- Llave de seguridad y autodiagnóstico al encendido.
- Gafas de protección profesional incluidas para paciente y operador.
- Patente mundial con certificación de calidad italiana.

## Experiencia del paciente

El tratamiento es **bien tolerado** gracias al enfriamiento por contacto. Las sensaciones típicas: ligero calor, leves toques eléctricos y posible enrojecimiento transitorio que desaparece rápidamente. El paciente puede retomar sus actividades inmediatamente.

## Contraindicaciones

- Embarazo.
- Hipertensión, diabetes o cardiopatías no controladas.
- Portadores de marcapasos.
- Enfermedades cutáneas graves o infecciones activas.
- Personas sensibles a la electricidad.
- Infiltración de toxina botulínica reciente (esperar 3 meses).
- Cirugía cutánea reciente (lifting, cirugía nasal, corrección de miopía con láser); proteger las zonas tratadas.

# Elevando la **excelencia** medico-estética



## **Novalis Medical S.A. de C.V.**

Egipto, Mz9, L3, Encinos, 14239, CDMX

(+52) 55 6518 7649

[mexico@novalismedical.com](mailto:mexico@novalismedical.com)

[novalismed.com/es](https://novalismed.com/es)



©2026 **Novalis Medical**. Todos los derechos reservados.

Novalis, el logotipo de Novalis Medical, NeuroNova, Aurora, CryoLab, Lumina, Lumina+, Gemini y Hi-Fu son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Novalis Medical en México y otros países.